

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА АВТОТЕСТ

Продукт: NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest
Производител: Beijing LEPU Medical Technology Co., Ltd.

Първи стъпки (всички компоненти са със стайна температура)

1

- Отстранете фолиото над лепящата лента „K“
- Тестовата карта трябва да се употреби в рамките на един час след отварянето на запечатания пакет

Вземане на проба

2

Във всяка ноздра:
Вкарайте върха на клечката-тампон ок. 2 - 3 cm, завъртете я пет пъти и при това я прекарайте над носната лигавица

5 x

Обработка на пробата

3

Вкарайте върха на клечката-тампон през отвора „B“ във вдлъбнатината „A“

4

Поставете шест капки във вдлъбнатината за проба „A“

След това завъртете тампона два пъти във всяка посока

6 x

2 x

2 x

5

Затворете картата, залепете с лепящата лента „K“ и внимателно съберете с натискане

6

Резултат след **15 min** отчетете от предната страна на картата

След повече от 20 минути не отчитайте резултат!

Оценка на резултатите

Всеки цветен оттенък при тестовата линия (T) се разглежда като положителен

Отрицателен
Цветна контролна линия (C)

Невалиден/неясен
Няма контролна линия (C)

Положителен
Цветна контролна (C) и тестова линия (T)

Изхвърляне

Изхвърляйте използваните тестови комплекти добре опаковани в домашните отпадъци

Учениците/ученичките, както и персонала в училището или градината могат да отидат в училището/градината

Повторете теста с нов материал

- Родителите съобщават в училището, че детето е болно, респ. персоналят на училището или градината съобщава, че е болно
- Учениците/ученичките, както и персоналят на училището или градината отиват за допълнителен PCR тест в централен тестов център



Тестови центрове за допълнително PCR тестване