


KRÓTKA INSTRUKCJA WYKONANIA SAMODZIELNEGO TESTU



Produkt: szybki test antygenowy NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2

Producent: Beijing LEPU Medical Technology Co., Ltd.

Pierwsze kroki (wszystkie składniki mają temperaturę pokojową)

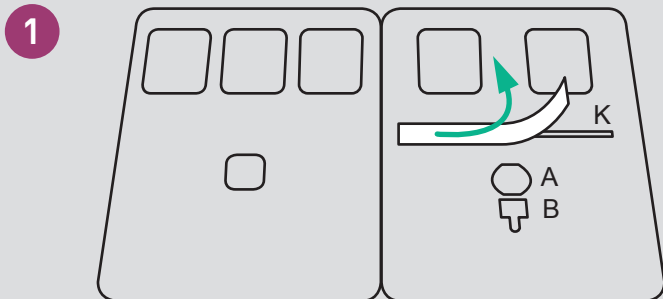

- 1
- Usunąć folię z paska kleju „K“
 - Kartę testową należy użyć w ciągu godziny od otwarcia zapieczętowanej torebki


Pobranie próbki

W każdym nozdrzu:
Wprowadzić końcówkę wymazówki na głębokość ok. 2 - 3 cm i przekręcić ją pięć razy pocierając o błonę śluzową nosa

5 x

2

Testowanie próbki

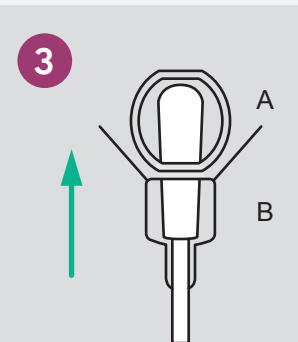

3


Wprowadzić końcówkę wymazówki przez otwór „B“ do wgłębienia „A“



4

Zaaplikować sześć kropli do wgłębienia na próbkę testową „A“

Następnie obrócić wacikiem dwa razy w każdym kierunku 2 x 2 x

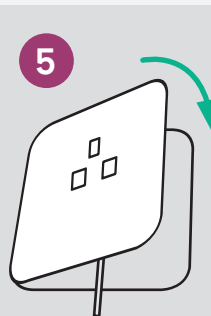

5

Zamknąć kartę, zakleić ją taśmą samoprzylepną „K“ i ostrożnie docisnąć

6

Odczyt po 15 minutach odczytać na pierwszej stronie karty

Po czasie dłuższym niż 20 minut wynik nie nadaje się do oceny!

Ocena wyników

Każdy kolorowy odcień na linii testowej (T) należy uznać za wynik dodatni




Ujemny

Kolorowa linia kontrolna (C)



Nieprawidłowy / niejasny

Brak linii kontrolnej (C)

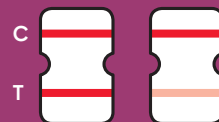

Dodatni

Kolorowa linia kontrolna (C) i linia testowa (T)

Uczniowie oraz pracownicy szkół i przedszkoli mogą pójść do szkoły / przedszkola

Powtórzyć test z nowym materiałem

- Rodzice zgłaszają chorobę dziecka w szkole, pracownicy szkół lub przedszkoli zgłaszają zachorowanie w swoim miejscu pracy
- Uczniowie oraz pracownicy szkół i przedszkoli wykonują powtórny test PCR w jednym z centralnych ośrodków testowych

Utylizacja



Zużyte zestawy testowe należy usunąć dobrze zapakowane do odpadów domowych



Ośrodki wykonujące testy PCR