


KRATKA UPUTSTVA ZA SAMOTESTIRANJE



Proizvod: Brzi test na antigen NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2
Proizvođač: Bejing LEPU Medical Technology Co., Ltd.

Prvi koraci (sve komponente imaju sobnu temperaturu)

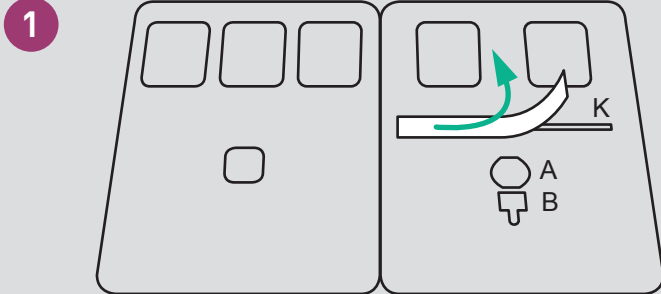


- Uklonite film preko lepljive trake „K“
- Testna kartica se mora iskoristiti u roku od jednog sata od otvaranja zapečaćene kesice

Uzimanje uzorka


U svaku nosnicu:
Umetnite vrh štapića za bris
cca. 2 - 3 cm, okrenite pet puta
i predite preko nosne sluznice

5 x

Tretman uzorka

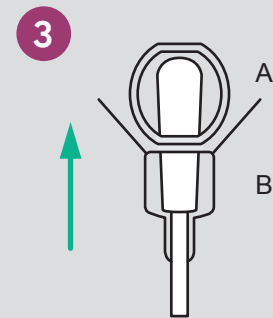


Vrh štapića za bris
pogurajte kroz otvor
„B“ u otvor „A“

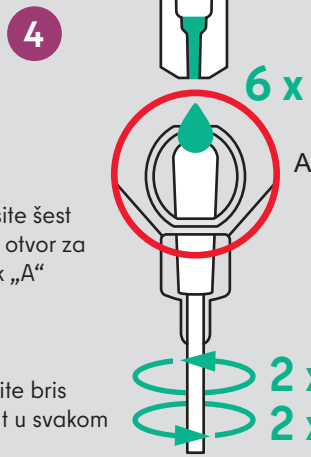

Nanesite šest
kapi u otvor za
uzorak „A“

Okrenite bris
dvaput u svakom
smeru

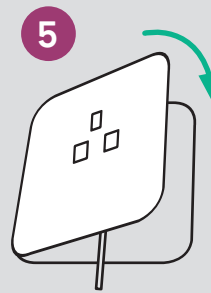

Zatvorite karticu,
zalepite trakom „K“
i oprezno pritisnite

Rezultat
nakon
15 min

očitajte na prednjoj
strani kartice



Ne procenjujte
rezultat nakon više
od 20 minuta!

Procena rezultata

Svaka nijansa boje na testnoj liniji (T) treba se smatrati pozitivnom




Negativno

Kontrolna linija
u boji (C)



Nevažee/nejasno

Nema kontrolne
linije (C)

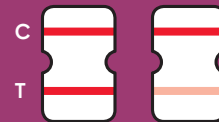

Pozitivno

Kontrolna linija (C)
i testna linija (T) u boji

Odlaganje



Odložite korišćene
testne komplete dobro
zapakovane sa kućnim
otpadom

Školarci, kao iškolsko ili
vrtičko osoblje mogu ići
u školu / vrtić

Ponovite test sa
novim materijalom

- Roditelji prijavljuju bolesno dete u školi ili školsko ili osoblje vrtića prijavljuje bolesno dete
- Školarci, kao i školsko ili vrtičko osoblje, testiraju PCR u jednom od centralnih test centara



Test centri za
PCR naknadni test