


# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОТЕСТИРОВАНИЮ



Продукт для экспресс-тестирования на антиген к SARS CoV-2 NASOCHECKcomfort  
Производитель: Beijing LEPU Medical Technology Co., Ltd.

## Первичные действия (все компоненты имеют комнатную температуру) Отбор образцов

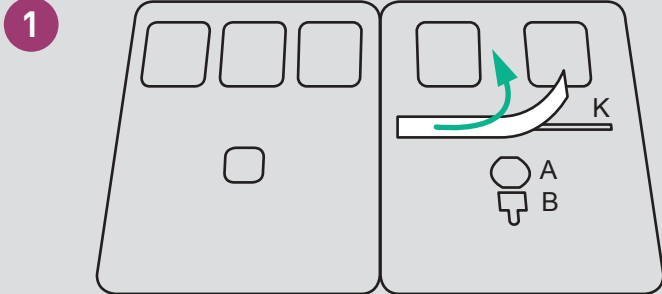


- Снимите пленку над клейкой полосой «К».
- Тестовую карту необходимо использовать в течение одного часа после вскрытия запечатанной упаковки.

В каждую ноздрю:  
введите кончик зонда-тампона  
прибл. на 2 - 3 см и поверните  
пять раз, касаясь при этом  
слизистой оболочки

5 x

## Правильное обращение с образцом

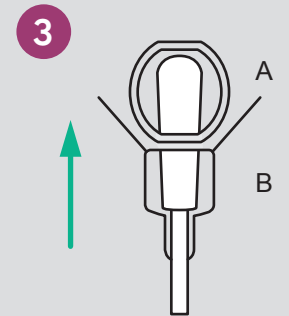


Введите кончик зонда-тампона через отверстие «В» в углубление «А»



Нанесите шесть капель в углубление для пробы «А»

Затем дважды поверните тампон в каждом направлении

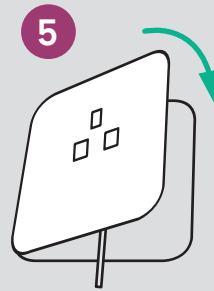

Закройте карту, склейте ее клейкой лентой «К» и осторожно сожмите

Результат  
через  
15 мин

виден на лицевой стороне карточки

По прошествии 20 минут результат больше не подлежит оценке!


## Оценка результатов

Любой цветовой оттенок тестовой полоски (Т) считается положительным




Отрицательный

Цветная контрольная (С) полоска

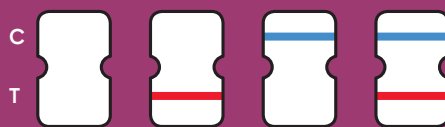

Недействительный/  
неясный

Контрольная (С) полоска отсутствует

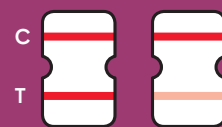

Положительный

Цветная контрольная (С) и тестовая (Т) полоска

## Утилизация



Использованные наборы для теста утилизируются отдельно вместе с домашними отходами

Учащиеся и персонал школы/детского сада могут посещать школу/детский сад

Повторный тест с новым материалом

- Родители уведомляют школу, что ребенок заболел, персонал школы/детского сада уведомляет о болезни
- Учащиеся и персонал школы/детского сада повторно делают ПЦР-тест в одном из центральных центров тестирования



Центры для повторного ПЦР-тестирования