

KISA KILAVUZ KENDİ KENDİNE TEST

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

BERLIN



Türkisch

Ürün: NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2 hızlı antijen testi
Üretici: Beijing LEPU Medical Technology Co., Ltd.

İlk adımlar (Tüm bileşenler oda sıcaklığındadır)

1

- "K" yapışkan şeridinin üzerindeki folyoyu çıkarın
- Test kaseti, kilitli poşet açıldıktan sonra bir saat içerisinde kullanılmak zorundadır

Örnek alma

2

Her burun deliğinde:
Sürüntü çubuğunun ucunu
yakl. 2 - 3 cm sokun, beş kez
çevirin ve bu sırada burun
mukozasından geçirin

5 x

Numune ile yapılacak işlemler

3

Sürüntü çubuğunun ucunu
"B" açıklığından geçirerek,
"A" haznesine kaydırın

4

Örnek haznesine
"A" altı damla
damlatın

Ardından çubuğu
iki kez her yöne
çevirin

6 x

2 x
2 x

5

Kaseti kapatın,
"K" yapışkan şeridi
ile yapıştırın ve
dikkatle sıkıştırın

6

Sonucu
15 dakika
sonra
kasetin ön
yüzünden okuyun

20 dakikadan
fazla bir sürenin
ardından sonuç
değerlendirmeyin!

Sonuçların değerlendirilmesi

Test çizgisindeki (T) her renk nüansı pozitif olarak değerlendirilmelidir

Negatif
Renkli kontrol
çizgisi (C)

Geçersiz/belirsiz
Kontrol
çizgisi (C) yok

Pozitif
Renkli kontrol (C)
ve test çizgisi (T)

Bertaraf etme

Kullanılan test kitlerini
iyi sarılmış bir şekilde
ev çöpüne atın

Öğrenciler ve okul veya
yuva personeli okula/yuvaya
gidebilirler

Test yeni malzemeyle
tekrarlanmalıdır

- Veliler okula çocuğun hasta olduğunu bildirirler;
okul veya yuva personeli hasta olduklarını bildirirler
- Öğrenciler ve okul veya yuva personeli merkezi test
merkezlerinden birinde ek PCR testi yaptırırlar



Ek PCR testi için
test merkezleri