


# HƯỚNG DẪN NGẮN GỌN CÁCH TỰ XÉT NGHIỆM



Sản phẩm: Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2  
Nhà sản xuất: Beijing LEPU Medical Technology Co., Ltd.


## Các bước đầu tiên (Tất cả các thành phần đều ở nhiệt độ phòng)

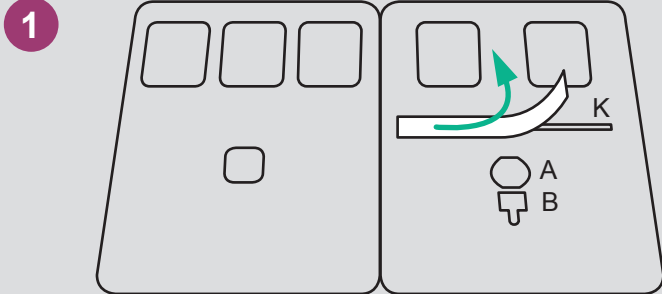


- 1
- Gỡ bỏ màng phim trên dải keo „K“
  - Thẻ xét nghiệm phải được sử dụng trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi mở túi niêm phong

## Thu thập mẫu

Ở từng lỗ mũi:  
Đưa đầu que lấy mẫu vào sâu khoảng 2 – 3 cm, xoay 5 lần và đồng thời chạm vào niêm mạc mũi

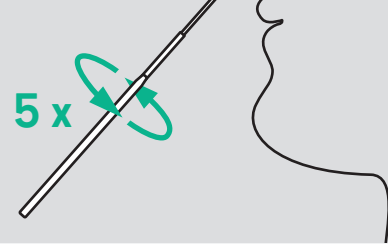


## Xử lý mẫu

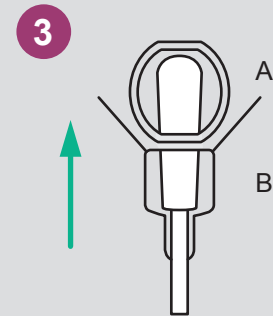

3


Đẩy đầu que lấy mẫu thông qua lỗ mở „B“ để vào tới hốc „A“

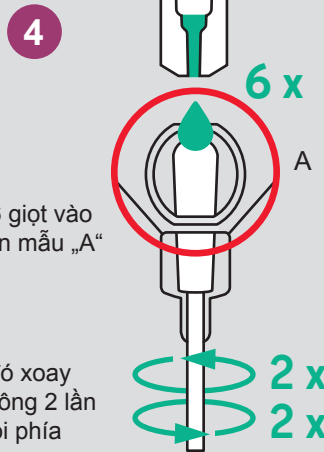

4

Nhỏ 6 giọt vào ô nhận mẫu „A“

Sau đó xoay que bông 2 lần về mọi phía

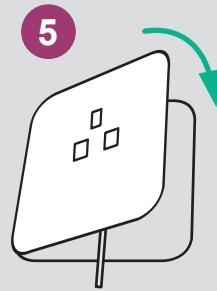

5

Gập thẻ lại, dán lại bằng dải keo „K“ và cẩn thận ép vào nhau



6

Kết quả sau **15 phút** xem ở mặt trước của thẻ

Nếu quá 20 phút thì không đánh giá kết quả nữa!

## Đánh giá các kết quả

Bất cứ độ màu nào của vạch kết quả (T) cũng đều được coi là dương tính




Âm tính

Vạch chứng màu (C)



Không hợp lệ/không rõ ràng

Không có vạch chứng (C)

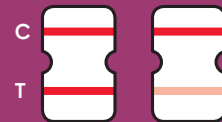

Dương tính

Vạch chứng màu- (C) và vạch kết quả (T)

Học sinh cũng như nhân viên của trường học/nhà trẻ có thể đến trường/đến nhà trẻ

Lặp lại xét nghiệm với vật liệu mới

- Phụ huynh báo với trường là con ốm hoặc là nhân viên của trường học/nhà trẻ báo mình bị ốm
- Học sinh cũng như nhân viên của trường học/nhà trẻ phải xét nghiệm lại PCR tại một trong những trung tâm xét nghiệm

## Thải bỏ



Thải bỏ bộ kit xét nghiệm đã qua sử dụng cô lập với rác thải sinh hoạt



Những trung tâm xét nghiệm để xét nghiệm lại PCR