

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА АВТОТЕСТ

Продукт: Medicovid-AG® SARS CoV-2 антигенен автотест за носа
Производител: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG


Първи стъпки (всички компоненти са със стайна температура)

1 Почистете многократно носа, след това измийте ръцете си

Поставете тръбичката в държател (напр. щипка)

2 Напълнете 8 капки (0,25 ml) буферен разтвор


8 x



Вземане на проба

3 Във всяка ноздра: вкарайте върха на клечката-тампон ок. 2,5 cm, завъртете три до четири пъти и при това прекарайте по лигавицата на носа, след това оставете тампона няколко секунди в ноздрата

3-4 x

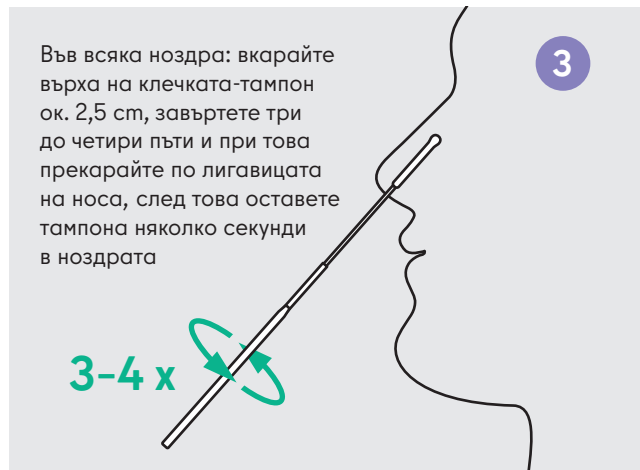

Обработка на пробата

4 Вкарайте клечката-тампон, завъртете я три до пет пъти пъти и я притиснете към страните на тръбичката.

3-5 x

5 Оставете клечката-тампон една минута в тръбичката

6 Притиснете тръбичката към тампона, за да освободите антигена

След това отстранете клечката-тампон и поставете здраво капачката


7

8 Капнете две до три капки във вдлъбнатината за проба „S“ в тестовата касета

2-3 x

9 Резултат след 15 min отчитане

След повече от 20 минути не отчитайте резултат!

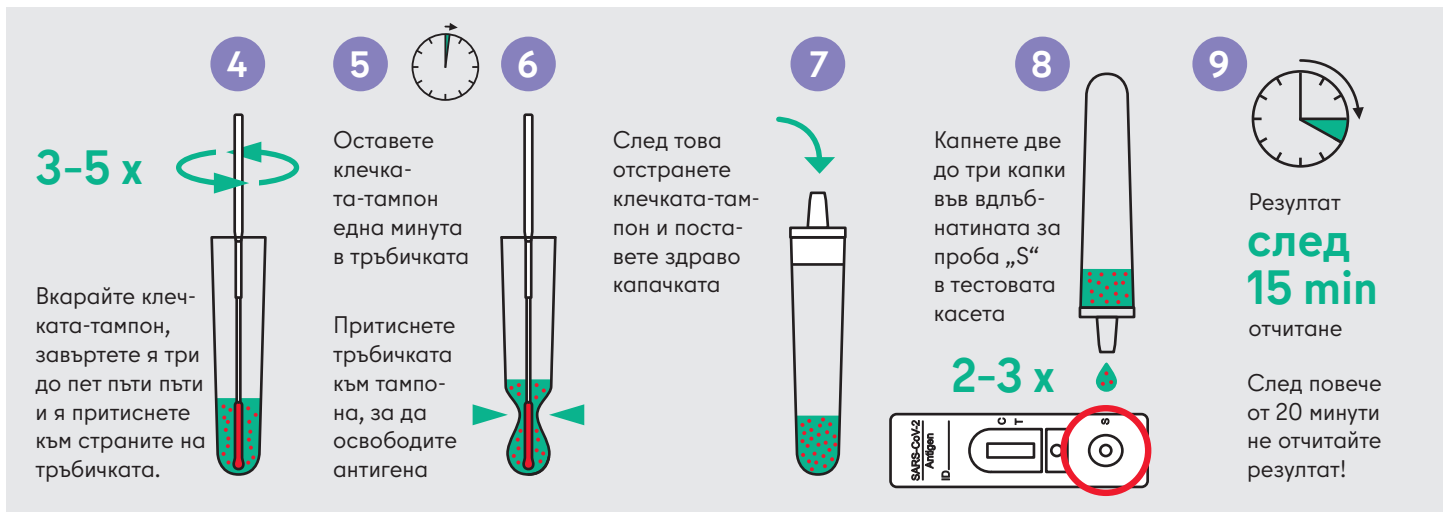

Оценка на резултатите

Всеки цветен оттенък при тестовата линия (T) се разглежда като положителен



Отрицателен

Положителен


Невалиден/неясен

Цветна контролна линия (C)

Цветна контролна (C) и тестова линия (T)

Няма контролна линия (C)

Изхвърляне



Изхвърляйте използваните тестови комплекти добре опаковани в домашните отпадъци

Учениците/ученичките, както и персонала в училището или градината могат да отидат в училището/градината

- Родителите съобщават в училището, че детето е болно, респ. персоналят на училището или градината съобщава, че е болно
- Учениците/ученичките, както и персоналят на училището или градината отиват за допълнителен PCR тест в централен тестов център

Повторете теста с нов материал