

# GUÍA RÁPIDA PARA EL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO



Producto: Medicovid-AG® Test nasal de autodiagnóstico de antígenos para SARS CoV-2  
Fabricante: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

## Primeros pasos (todos los componentes a temperatura ambiente)

1 Lávese la nariz repetidamente, a continuación lávese las manos

Coloque el tubito en un soporte (p. ej. una pinza)

2 Añada 8 gotas (0,25 ml) de solución tampón

8 x

## Toma de muestra

3 En cada orificio nasal: introduzca la punta del bastoncillo unos 2,5 cm, gírelo tres o cuatro veces frotándolo contra la mucosa nasal, dejándola en el interior de la nariz durante algunos segundos

3-4 x

## Manipulación de la muestra

4 Introduzca el bastoncillo y gírelo de tres a cinco veces, presionándolo contra las paredes del tubito

3-5 x

5 Deje el bastoncillo dentro del tubito durante un minuto

6 Empuje el tubito contra el bastoncillo para que los antígenos se disuelvan

A continuación, extraiga el bastoncillo y apriete firmemente la tapa con el cuentagotas

7

8 Aplique hasta tres gotas sobre la hendidura para la muestra «S» que hay en la bandeja de ensayo

2-3 x

9 Lectura **al cabo de 15 min** del resultado

¡Transcurridos más de 20 minutos el resultado ya no será válido!

## Valoración de los resultados

Cualquier marca que aparezca sobre la línea de test (T) se considerará positiva, independientemente de su color

**Negativo**: Línea de control de color (C)

**Positivo**: Línea de ensayo (T) y línea de control (C) de color

**Erróneo/poco claro**: Sin línea de control de color (C)

## Eliminación

Elimine cada kit de ensayo como residuo doméstico debidamente envasado

Los niños y el personal docente podrán ir al colegio o a la guardería

- Los padres comunicarán en el colegio que su hijo está enfermo, y el personal docente informará que se encuentra enfermo
- Los niños y el personal docente de colegios y guarderías se someterán a pruebas PCR en un centro de pruebas oficial

Repita el test con nuevo material