

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОТЕСТИРОВАНИЮ

Продукт: Самостоятельного тестирования (нос) на антиген к SARS CoV-2 Medicovid-AG®
Производитель: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG


Первичные действия (все компоненты имеют комнатную температуру)

1 Несколько раз прочистите нос, затем вымойте руки

Зафиксируйте пробирку (напр. прищепкой)

2 Налейте 8 капель (0,25 мл) буферного раствора


8 x

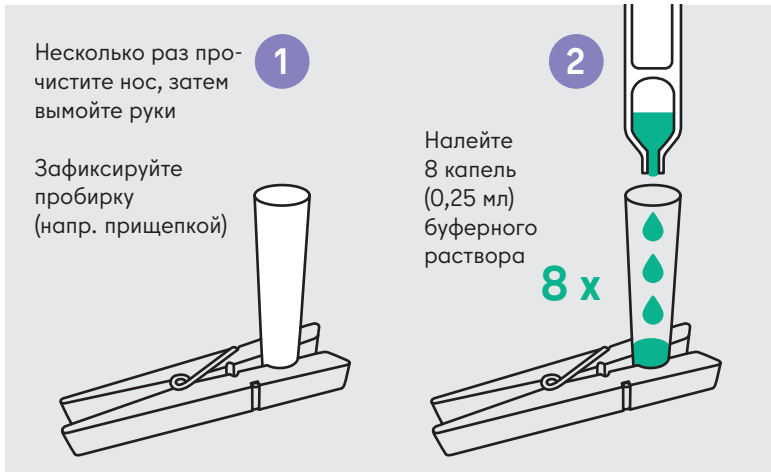

Отбор образцов

3 В каждую ноздрю: введите зонд-тампон прилб. на 2,5 см, поверните 3-4 раза, касаясь при этом слизистой оболочки, затем оставьте на несколько секунд в носу

3-4 x

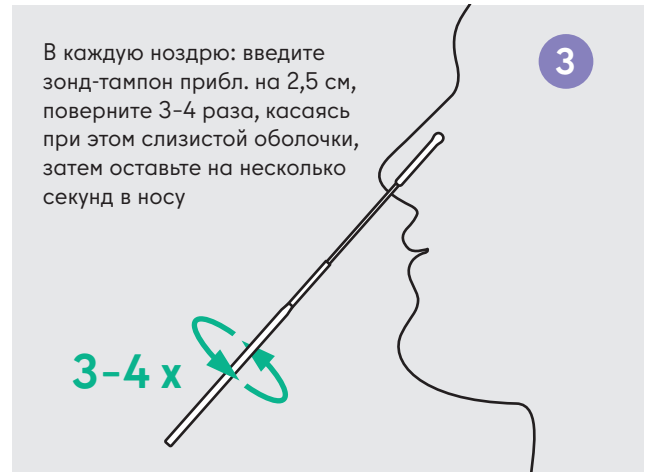

Правильное обращение с образцом

4 Введите зонд-тампон и поверните 3-5 раз, прижимая к стенкам пробирки

3-5 x

5 Оставьте зонд-тампон в пробирке на одну минуту

При этом прижимайте пробирку к тампону для выделения антигенов


6 Затем извлеките зонд-тампон и плотно закройте пробирку крышечкой

7 Нанесите 2-3 капли в углубление для пробы «S» на тесте

2-3 x

8 Результат через 15 мин виден

По прошествии 20 минут результат больше не подлежит оценке!



Оценка результатов

Любой цветовой оттенок тестовой полоски (Т) считается положительным




Отрицательный
Цветная контрольная (С) полоска

Положительный
Цветная контрольная (С) и тестовая (Т) полоска

Недействительный/неясный
Контрольная (С) полоска отсутствует

Утилизация



Использованные наборы для теста утилизируются отдельно вместе с домашними отходами

Учащиеся и персонал школы/детского сада могут посещать школу/детский сад

— Родители уведомляют школу, что ребенок заболел, персонал школы/детского сада уведомляет о болезни
— Учащиеся и персонал школы/детского сада повторно делают ПЦР-тест в одном из центральных центров тестирования

Повторный тест с новым материалом