

KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: VIROMED RAPID TEST for the detection of SARS-CoV-2
Hersteller: NanoRepro AG

Erste Schritte

1 Testkassette entnehmen und auf eine ebene Fläche legen

NanoRepro AG
SARS-CoV-2
Antigen
ID: _____
C T S

Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2 Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 1,5 cm einführen, gegen die Nasenwand drehen und dabei fünfmal langsam kreisförmig über die Nasenschleimhaut führen

5 x

Behandlung der Probe

3 Weißen Deckel entfernen

4 Abstrichtupfer einführen und drehen
Röhrchen gegen Tupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen
10-15 x

5 Tupfer unter festem Druck auf die Röhrchenwand entnehmen und Tropfdeckel schließen

6 Drei Tropfen in Probenvertiefung „S“ auf der Testkassette geben
3 x

7 Ergebnis nach 15 min ablesen
Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

Negativ
Farbige Kontrolllinie (C)

Ungültig/unklar
Keine Kontrolllinie (C)

Positiv
Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Entsorgung

Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen



Testzentren zur PCR-Nachtestung