

KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: COVID-19 Antigen-Nachweis-Kit - Nasenabstrich
 Hersteller: NEWGENE Bioengineering

Erste Schritte

1 Testkassette entnehmen und auf eine ebene Fläche legen

Probennahme (bei Zimmertemperatur)

2 Nase putzen, Hände waschen

Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 2-3 cm einführen, gegen die Nasenwand drehen und dabei fünfmal langsam kreisförmig für 20 Sekunden über die Nasenschleimhaut führen

20 Sek **5 x**

Behandlung der Probe

3 Versiegelung vollständig abziehen

4 Abstrichtupfer einführen und fünfmal drehen **5 x**
 Röhrchen gegen Tupfer zusammendrücken und min. dreimal auf und ab bewegen **3 x**

5 Tupfer unter festem Druck auf die Röhrenwand entnehmen und Tropfkappe aufsetzen

6 Röhrchen eine Minute stehen lassen

7 Drei Tropfen in Probenvertiefung „S“ auf der Testkassette geben **3 x**

8 Ergebnis **nach 15 min** ablesen

Nach mehr als 30 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

Negativ
 Farbige Kontrolllinie (C)

Ungültig/unklar
 Keine Kontrolllinie (C)

Positiv
 Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Entsorgung

Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen



Testzentren zur PCR-Nachtestung