


KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigenestkit (kolloidales Gold) CE 1434
 Hersteller: Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd.

Erste Schritte

1 Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben

2 Röhchen in das Loch der Schachtel oder der Probenhalterung stellen

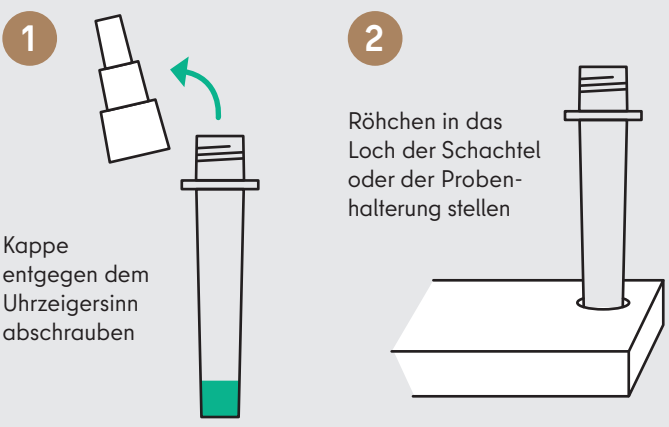


Probennahme (bei Zimmertemperatur)

Nase putzen, Hände waschen

3 Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher ca. 2 cm einführen, gegen die Nasenwand drehen und dabei fünfmal langsam kreisförmig über die Nasenschleimhaut führen

5 x

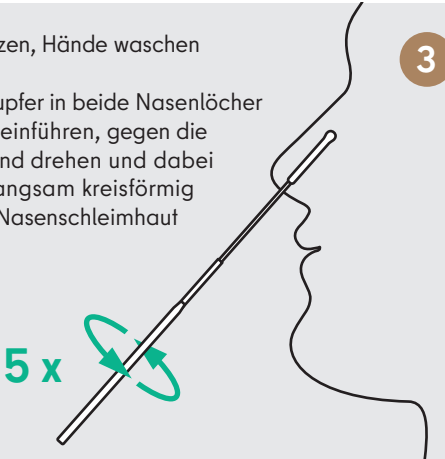

Behandlung der Probe

4 10 Sek Abstrichtupfer einführen und 10 Sekunden drehen

Röhchen dabei gegen Tupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen

5 Tupfer unter festem Druck auf die Röhrenwand entnehmen

Kappe aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen


6 Weiße Tropfkappe entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben

7 Zwei Tropfen in Probenvertiefung „S“ auf der Testkassette geben

2 x


8 Ergebnis nach 15 min ablesen

Nach mehr als 30 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

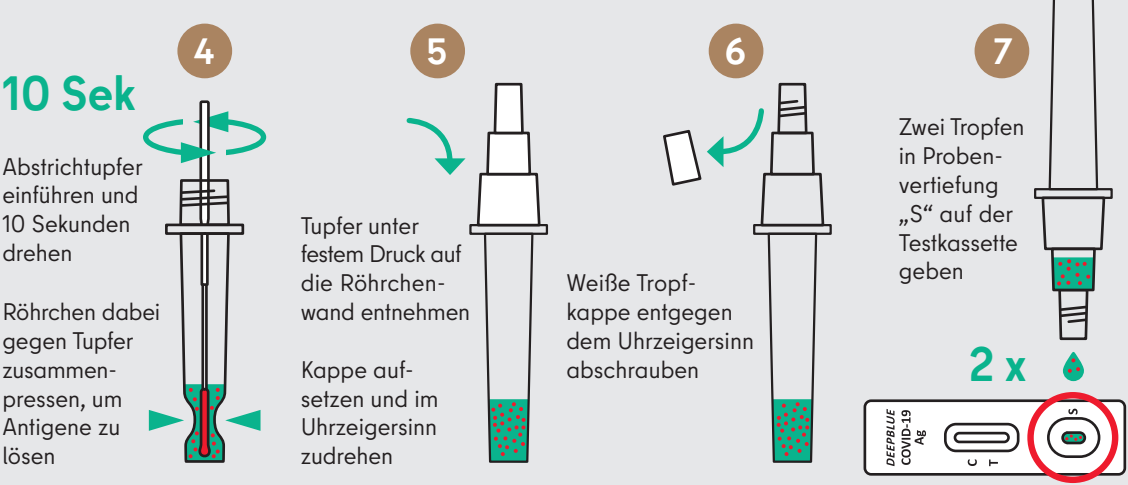

Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

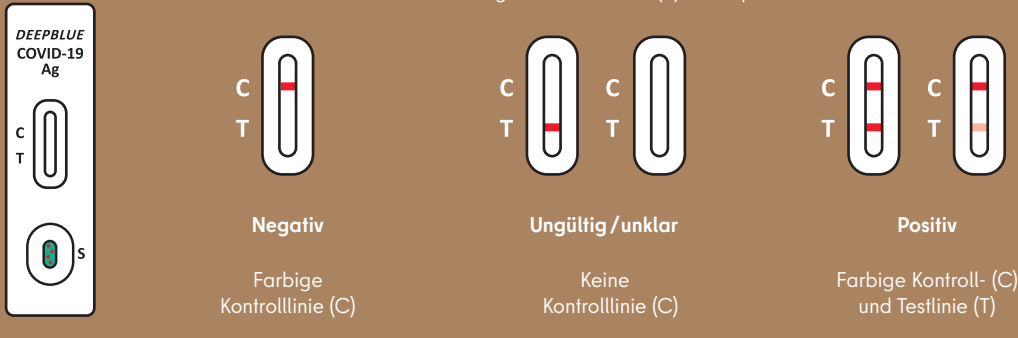

Negativ
Farbige Kontrolllinie (C)

Ungültig / unklar
Keine Kontrolllinie (C)

Positiv
Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

Entsorgung



Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen



Testzentren zur PCR-Nachtestung