

# KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

Produkt: Medicovid-AG® SARS CoV-2 Antigen Selbsttest Nase  
 Hersteller: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

## Erste Schritte (Alle Komponenten haben Zimmertemperatur)

**1** Nase mehrmals putzen, dann Hände waschen

Röhrchen in eine Halterung stellen (z. B. Klammer)

**2** 8 Tropfen (0,25 ml) Pufferlösung einfüllen

8 x

## Probennahme

**3** In jedem Nasenloch: Spitze des Abstrichtupfers ca. 2,5 cm einführen, drei- bis viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen, dann Tupfer einige Sekunden im Nasenloch lassen

3-4 x

## Behandlung der Probe

**4** 3-5 x Abstrichtupfer einführen und drei- bis fünfmal drehen und gegen die Seiten des Röhrchens drücken

**5** Abstrichtupfer eine Minute im Röhrchen stehen lassen

**6** Röhrchen gegen Tupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen

Anschließend Abstrichtupfer entnehmen und Tropfkappe fest aufsetzen

**7**

**8** Zwei bis drei Tropfen in Probenvertiefung „S“ auf der Testkassette geben

2-3 x

**9** Ergebnis nach 15 min ablesen

Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

## Auswertung der Ergebnisse

Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

**Negativ**  
Farbige Kontrolllinie (C)

**Ungültig / unklar**  
Keine Kontrolllinie (C)

**Positiv**  
Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

## Entsorgung

Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal können zur Schule/Kita gehen

Test mit neuem Material wiederholen

- Eltern melden Kind in Schule krank bzw. Schul- oder Kitapersonal meldet sich krank
- Schüler/-innen sowie Schul- oder Kitapersonal lassen PCR-Nachtestung in einem der zentralen Testzentren durchführen



Testzentren zur PCR-Nachtestung